

Kompressio-opas

Kompressiotuotteet





Kompressiokuvasto

Tämän opas on suunniteltu antamaan sinulle tietoa turvotuksen hoitoon käytettävistä kompressiotuotteista, niiden ominaisuuksista ja käytöstä. Oppaassa käydään läpi kompression merkitystä turvotuksen hoidossa, kompressiotuotteen valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä esimerkkejä tuotteista ja kompressiotuotteiden yleisimpiä käyttöaiheita.

Respectan kompressiovalikoima kattaa muun muassa lääkinnälliset hoitosukat, -hihat ja -käsineet, kompressorintaliivit, tarrakiinnitteiset kompressiotuotteet sekä yksilöllisesti valmistettavat ja sovitettavat kompressiotuotteet. Kompressiotuotteet mitoitetaan aina klinikallamme koulutetun asiantuntijamme toimesta.

Toimimme usean eri kompressiovalmistajan jakelijana. Tässä oppaassa esitetyt ratkaisut ovat esimerkkejä kompressiomahdollisuuksista. Laajemmat tuotevalikoimat ja yksityiskohtaiset tuotetiedot löydät valmistajien laatimista oppaista sekä kysymällä Respectan kompressioasiantuntijoilta.

Kompressio on turvotuksen tärkein hoitomuoto

**Kompressio-
hoito
vähentää
turvotusta.**


Turvotuksen hoito on tärkeä osa toimintakyvyn tukemista ja edistämistä. Turvotus vaikeuttaa verenkierron ja lymfanestekierron toimintaa sekä heikentää muun muassa kudosten ja haavan paranemista sekä lisää kipua. Kipu ja turvotus vaikeuttavat liikkumista ja arjesta suoriutumista.

Turvotuksen oireilu ja määrä on yksilöllistä. Turvotusta tulee hoitaa, jottei oireet pahene. Pitkään jatkuessa turvotus voi aiheuttaa ihomuutoksia, haavaumia ja infektioita.


Turvotus voi johtua useasta eri syystä. Syynä voi olla laskimoiden tai lymfanestekierron vajaatoiminta, trauma, leikkaus, ylipaino, sydämen vajaatoiminta, maksan tai munuaisten toimintahäiriö, erysipelas ruusutulehdus tai laskimotukos.

Turvotus syntyy, kun kudosten solujen välitilaan kertyy nestettä. Turvotusneste muodostuu hiusverisuonista tihkumalla ympäröiviin kudoksiin. Nestettä siirtyy enemmän ulos kuin hiussuonet ja lymfa- eli imunestesuonet kykenevät imemään takaisin.


Kompressiohoidossa turvonneisiin kudoksiin kohdistetaan ulkoinen paine, jonka tarkoituksena on vähentää nesteen tihkumista ympäröiviin kudoksiin ja ohjata neste takaisin laskimoihin ja lymfasuoniin. Kompressiohoito myös nostaa kudoksen lämpötilaa, jolloin nesteen liikkuminen ja takaisinimeytyminen kudoksissa lisääntyy.

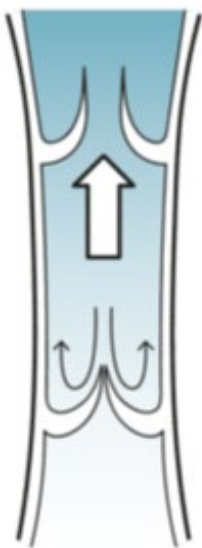

Terve suoni

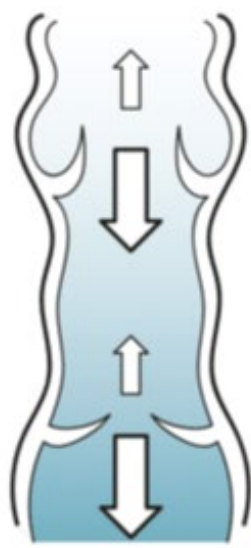

Turvotus

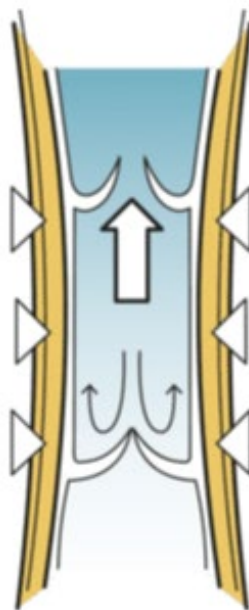

Kompressio

**Pitkittynyt
turvotus
aiheuttaa
ongelmia ja
pahentaa
oireita.**

Turvotuksen hoito kompressiolla

Turvotuksen hoito voidaan toteuttaa kompressiotuotteilla tai -sidoksien.

Kompressiotuotevalikoimamme sisältää kompressiotuotteet eli lääkinnälliset hoitotuotteet alajäsen- ja yläraajoille sekä vartalolle. Kompressiotuotteita on saatavilla vakiokokoisina valmistuotteina sekä yksilöllisesti mittatilauksena valmistettuina.

On tärkeää, että kompressiotuote on mitoitettu oikein. Mittaus tulee suorittaa koulutetun mittaajan toimesta. Näin varmistetaan, että kompressiotuotteen paine toteutuu oikein. Kompressiotuotteen paine on suurimmillaan raajan ääreisosissa ja vähenee ylöspäin tultaessa.

Oikean tuotteen lisäksi onnistunut kompressiohoito edellyttää hoitohenkilökunnan tietotaitoa kompressiohoidosta sekä asiakkaan sitoutumista kompressiotuotteen käyttöön. Sitoutumista edesauttaa laadukas ohjaus ja neuvonta kompressiotuotteen käytöstä, pukemisesta ja huollosta.

Hoitomyöntyvyyttä voidaan lisätä osallistamalla asiakasta esimerkiksi tuotteen valintaan.

Kompressiotuotteita on saatavilla useita eri materiaaleja ja värejä. Värin valinta voi olla merkittävä tekijä hoitoon sitoutumisessa.



**Mikä vain
kompressio-
menetelmä oikein
toteutettuna on
parempi kuin ei
kompressiota
lainkaan!**



Kompressiotuotteen käyttö

Kompressiotuote on henkilökohtainen. Oikea kompressiotuote valitaan yksilöllisesti mittausten mukaan.

Kompressiotuotetta käytetään pääsääntöisesti päivittäin aamusta iltaan, ellei toisin ohjata. Kompressiotuote tulee pukea mahdollisimman pian sängystä nousemisen jälkeen, sillä tällöin turvotus on vähäisintä. Käytössä on hyvä olla kaksi kompressiotuotetta tai paria, jotta kompressiohoito toteutuu myös tuotteen ollessa pesussa. Kompressiotuote pestään päivittäin alkuperäisen muodon palauttamiseksi.

Toimiva kompressiotuote edellyttää, että tuotteen mitoitus on oikea ja ajantasainen. Jos turvotusta hoidon alkaessa on paljon, on hyvä kontrolloida tiheämmin, että kompressiotuote on edelleen oikean kokoinen. Mikäli tuote alkaa tuntua löysältä, on uudelleen mittaaminen ja kompressiotuotteen uusiminen aiheellista.

**Tuotteen keston
vaikuttaa mm. ihon
ja kynsien kunto,
pukemistekniikka,
käyttäjän paino ja
aktiivisuusaste.**

Kompressiotuotteen pesu

Kompressiotuotteen kudος löystyy käytössä, mutta tiivistyy jälleen pesussa. Konepesu palauttaa tuotteen muodon tehokkaammin kuin käsinpesu. Konepesu puhdistaa ihon hilseen ja rasvan tuotteen silmukoista tehokkaammin kuin käsinpesu.

Kompressiotuote tulee pestä jokaisen käyttökerran jälkeen, mieluiten konepesulla (hienopesu 40°C) miedolla pesuaineella. Huuhteluainetta ei tule käyttää. Pesupussin käyttö suojaa tuotetta. Kiinnitykset tulee sulkea ennen pesua. Mikäli tuote pestään käsin, tulee huomioida, ettei tuotetta saa vääntää. Tuotteen annetaan kuivua vapaasti ilmapaikassa eikä lämmönlähteiden lähellä.

Kompressiotuotteen uusiminen

Päivittäisessä käytössä kompressiotuote menettää kompressiota ja elastisuutta. Tuotteen tehokas elinikä on 6 kk. Tuote tulee uusia vähintään 6 kk:n välein. Kompressiotuotteen keston vaikuttaa muun muassa ihon kunto, pukemistekniikka, kynsien kunto, käyttäjän paino ja aktiivisuusaste.

Mikäli tuote on rikkoutunut, sitä ei tule korjata itse. Rikkoutunut tai epäsopeva tuote tulee uusia. Myös voimakkaan turvotustaipumuksen, ympärysmittojen muuttumisen ja kovan kulutuksen vuoksi tuote voi olla tarpeellista uusia useammin kuin 6 kk:n välein.

**Rikkoutunut,
epäsopeva tai
väljäksi jäänyt
kompressio-
tuote tulee
uusia.**

Vasta-aiheet kompression käytölle

Kompressiohoitoa ei tule käyttää, mikäli hoidolle on vasta-aiheita. Hoitava lääkäri varmistaa, ettei kompressiotuotteen käytölle ole vasta-aiheita.

Ehdottomia vasta-aiheita ovat keuhkopöhö ja merkittävä valtimoverenkierron vajaatoiminta. Ennen kompressiohoidon aloitusta hoitava lääkäri tekee potilaalle kokonaisvaltaisen arvioinnin, johon kuuluu pulssistatus ja ABI-mittaus eli alaraajavaltimoiden verenkierron perustutkimus.

Mahdollisia vasta-aiheita ovat lisäksi valtimoperäinen säärihaava, hoitamaton sydämen vajaatoiminta, akuutti tai märkivä ihotulehdus.

Ennen kompressiohoidon aloittamista on lääkärin myös syytä selvittää kompression käytön turvallisuus, mikäli turvotus ei laske yön aikana ja pysyy määrältään samanlaisena läpi vuorokauden.

Kompressio- eli paineluokat

Kompressiomateriaalit jaotellaan neljään eri kompressioluokkaan nilkkaan tai ranteeseen kohdistuvan paineen mukaan saksalaisen RAL- tai CEN-laatustandardien mukaisesti. Kompressioluokasta käytetään myös termiä paineluokka tai puristusluokka. Kompressioluokista käytetään lyhenteitä KL (kompressioluokka), PL (paineluokka) tai CCL (compression class). Mikäli asiakkaan hoitomyöntyvyys suosituksen mukaiselle kompressioluokalle on heikko, on suositusta pienempi kompressioluokka parempi vaihtoehto kuin ei kompressiota lainkaan.

RAL-laatustandardin mukaiset kompressioluokat

18-21 mmHg KL 1 - kevyt kompressio

- lievä turvotus, johon liittyy tunne väsyneistä tai raskaista jaloista
- lievä laskimovajaatoiminta
- yksittäiset suonikohjut
- ennaltaehkäisevä hoito raskauden aikana

23-32-mmHg KL 2 - kohtuullinen kompressio

- suonikohjut, joihin liittyy syvien laskimosuonien vaurioituminen
- säärien turvotus raskauden aikana
- suonikohjutoimenpiteiden jälkihoito
- säärihaavojen ennaltaehkäisy ja hoito

34-46 mmHg KL 3 - voimakas kompressio

- säärihaavojen jälkihoito
- säärien voimakas turvotustaipumus
- krooninen laskimoiden vajaatoiminta
- Vaikean lymfaturvotuksen hoito ja ennaltaehkäisy

>49 mmHg KL 4 - hyvin voimakas kompressio

- vakavat lymfaattiset tukokset
- lymfaturvotus ja fibroosi



**Kompressio-
luokan
määrittää
hoitava lääkäri.**

Kompressioluokat

CEN-laatustandardin mukaiset kompressioluokat

Paine-luokka	Paine mmHg (CEN)	Sukkatyyppi	Käyttöaihe
	CEN= Comité Européen de Normalisation		
I	15-23	Tukisukka (kevyt hoitosukka)	• Syvän laskimotukoksen ja laskimotulehduksen ehkäisy, esim. matkustettaessa • Lievä laskimovajaatoiminta • Suonikohjujen ehkäisy- ja hoito: istuma- ja seisomatyö, raskausaika • Lievät suonikohjut • Trauman jälkeinen turvotus • Alaraajojen väsyminen • Pitkät lento- ym. matkat
II	25-34	Hoitosukka	• Laskimoperäinen turvotus • Säärihaava, ehkäisy ja hoito • Imutieperäinen turvotus • Suonikohjutoimenpiteiden jälkihoito: leikkaus, vaahdotus, laser • Ruusun jälkihoito • Varikoottinen ekseema
III	35-49	Hoitosukka	• Vaikea laskimoperäinen turvotus • Säärihaava
IV	Yli 50	Hoitosukka	• Vaikea imutieperäinen turvotus

Vakiokoko vai yksilöllinen mittatilausratkaisu?

Kompressiotuotteita on saatavilla vakiokokoisina valmistuotteina sekä yksilöllisesti mittojen mukaan valmistettuna.

Toimivan hoidon takaamiseksi on tärkeää, että tuote on mitoitettu ja valittu oikein. Liian löysä kompressiotuote ei ole hyödyllinen. Liiallinen kireys aiheuttaa ongelmia ja tuote jää helposti käyttämättä.

Vakiokokoisen tuotteen oikea koko selviää mitanoton jälkeen kokotaulukosta. Mikäli kompressiotuotetta varten otetut mitat eivät täsmää kokotaulukkoon, on syytä valita yksilöllinen ratkaisu. Tällöin kompressiotuote valmistetaan mittatilausena yksilöllisten mittojen perusteella.


Mittatilausena valmistetut lääkinälliset kompressiotuotteet varmistavat täydellisen istuvuuden ja oikean kompression.

Mittatilaustuotteisiin on mahdollista valita useita eri lisäominaisuuksia vastaamaan käyttäjän yksilöllisiä tarpeita ja parantamaan tuotteen käytettävyyttä.

Lisäominaisuuksia tarvitaan muun muassa tilanteissa, joissa käyttäjällä on kudospuutoksia tai epämuodostumia, herkkä iho, pukeminen on haasteellista, tuote ei pysy paikallaan tai kompressiota tarvitaan lisätä paikallisesti.

Mitat ja lisäominaisuuksien tarve ratkaisee tarvitaanko vakiokokoinen vai yksilöllinen mittatilausratkaisu. Istuvuudesta ei pidä tinkiä. Huonosti istuva kompressiotuote on epämiellyttävä käyttää ja pahimmassa tapauksessa pahentaa turvotusta.

Mitat ja lisäominaisuuksien tarve ratkaisee tarvitaanko vakiokokoinen vai yksilöllinen mittatilausratkaisu.

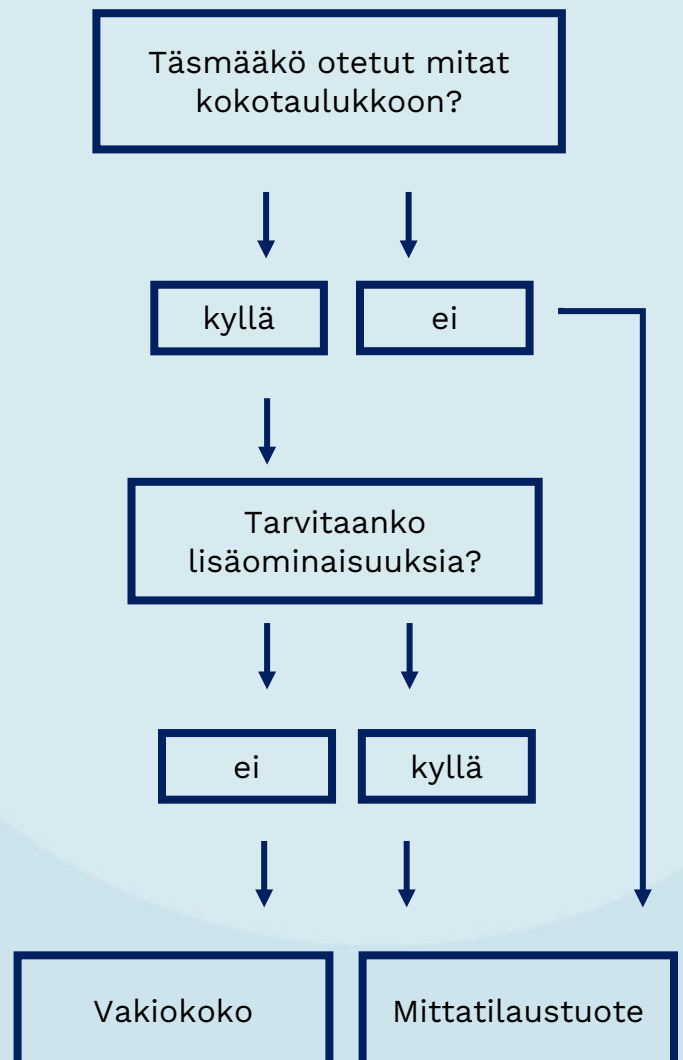

Esimerkkejä yksilöllisistä lisäominaisuuksista

Erilaiset silikonit	• Auttaa tuotetta pysymään paikallaan • Estää tuotetta valumasta	
Nilkkakulma Polvikulma Kyynärpääkulma	• Lisää tuotteen istuvuutta • Pitää tuotteen oikealla kohdalla • Lisää tuotteen käyttömukavuutta • Edesauttaa nivelen luonnollista liikelaajuutta	
Vetoketjut	• Haavasidokset pysyy pukiessa paikoillaan • Helpottavat pukemista ja pukemisen avustamista. • Riski herkälle ohuelle iholle • Vaativat sormivoimaa.	
Viistotut yläreunat	• Lisää tuotteen istuvuutta • Parantaa hoitotehoa laajentamalla aluetta, johon kompressio kohdistuu • Edesauttaa tuotetta pysymään paikallaan	
Lisävuoraukset esim. kantapään tai jalkapohjan alle	• Lisää tuotteen kestoä lisääntyneestä kuormituksesta johtuen (esim. kuiva kantapää)	
Trikoovuoraukset	• Suojaa herkkää ihoa hankautumisilta esim. taivealueilla	
Viistottu jalkaterä	• Parantaa istuvuutta ja paikallaan pysymistä • Laajentaa kompressioaluetta • Estää varvasvälejä hautumasta antamalla varpaille tilaa	
Pelottitasku	• Pitää lisäkompressiota tuovan pelotin tai levyn paikallaan	
Olkaosa + vartalokiinnitys	• Vaihtoehto henkilöille, joille silikonikiinnitys ei sovi	

Kompressiomateriaalit valmistustekniikan mukaan

Kompressiomateriaaleja valmistetaan eri tekniikoin ja niillä on eri käyttökohteet. Tyypilliset materiaalit ovat pyörökudotut ja laakakudotut materiaalit.


Pyörökudottu materiaali

Pyörökudotussa tuotteessa neulos on yhtenäinen, eikä siinä ole saumoja. Neulos on ohut ja elastinen.

Ensisijaisesti käytetty **materiaali lievän ja keskivaikean laskimoperäisen turvotuksen hoitoon**. Materiaalia käytetään sekä standardituotteissa että mittatilaustuotteissa.

Kompression asteittainen keventäminen toteutetaan **silmukkokoko** muuttamalla. Silmukoiden määrä pysyy samana läpi tuotteen.

Pyörökudotusta materiaalista saatavilla kompressioluokat 1-3.

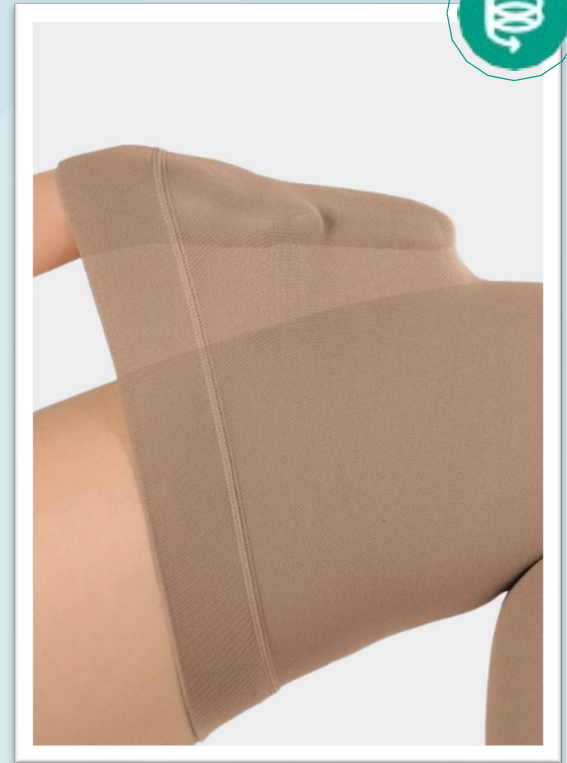


Laakakudottu materiaali

Laakakudottu materiaali on kudottu kankaaksi ja ommeltu muotoon. Se on paksumpi ja vähäelastisempi materiaali kuin pyörökudottu.

Käytetään muun muassa **vaikean laskimoperäisen turvotuksen ja lymfaturvotuksen hoitoon, tai jos hoidettava alue on muodoiltaan poikkeava**. Pääosin mittatilaustuotteita.

Kompression asteittainen keventäminen toteutetaan **silmukkamäärää** muuttamalla.

Laakakudotusta materiaalista saatavilla kompressioluokat 1-4.

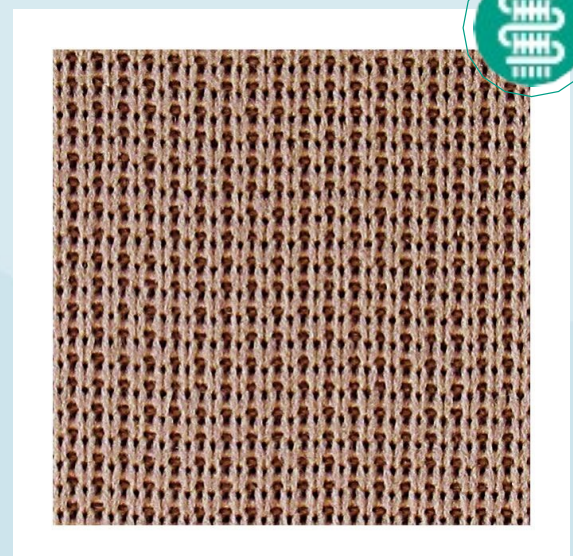

Lääkinnälliset hoitosukat

Lääkinnälliset hoitosukat on valmistettu joustavasta, kestävästä, hengittävästä ja ihoa vasten miellyttävästä neuloksesta. Lääkinnällisistä hoitosukista käytetään myös termejä kompressiosukat tai tukisukat

Sukkia on saatavana useissa eri väreissä ja pituuksissa. Tyypillisemmin lääkinnälliset hoitosukat ovat joko polvimittaiset (AD), reisimittaiset (AG) tai sukkahousut (AT). Lääkinnällisiä hoitosukkia on saatavana avo- ja umpikärkisellä varvasosalla.

Lääkinnälliset hoitosukat saavat puristuspaineen jakautumaan lääketieteellisesti oikealla tavalla. Nilkan alueella hoitopaine on suurin, paine alenee kohti raajan yläosaa. Tämän seurauksena verenkierto ja imunesteen virtaus tehostuu.


Yleisimmin lääkinnällisiä hoitosukkia käytetään mm. turvotuksen, laskimotukoksen, suonikohjujen säärihaavojen ja traumaperäisen turvotuksen hoitoon.

Lääkinnällisiä hoitosukkia on neljää eri kompressioluokkaa. Kompressioluokka määritellään nilkkaan kohdistuvan paineen perusteella. Kompressioluokan määrittää hoitava lääkäri. Myös sukan pituus on hyvä mainita lääkärin ohjeessa.

Hoitosukkia on saatavilla sekä valmistuotteina että mittatilaustuotteena.

Mittatilauksena valmistettuihin yksilöllisiin hoitosukkiin on mahdollista lisätä useita erilaisia lisäominaisuuksia, jotka parantavat sukan istuvuutta, käytettävyyttä, tehoa ja turvallisuutta.

Valmistuotteena hoitosukat toimitetaan pareittaan. Mittatilauksena hoitosukkia voidaan valmistaa myös yksittäin.

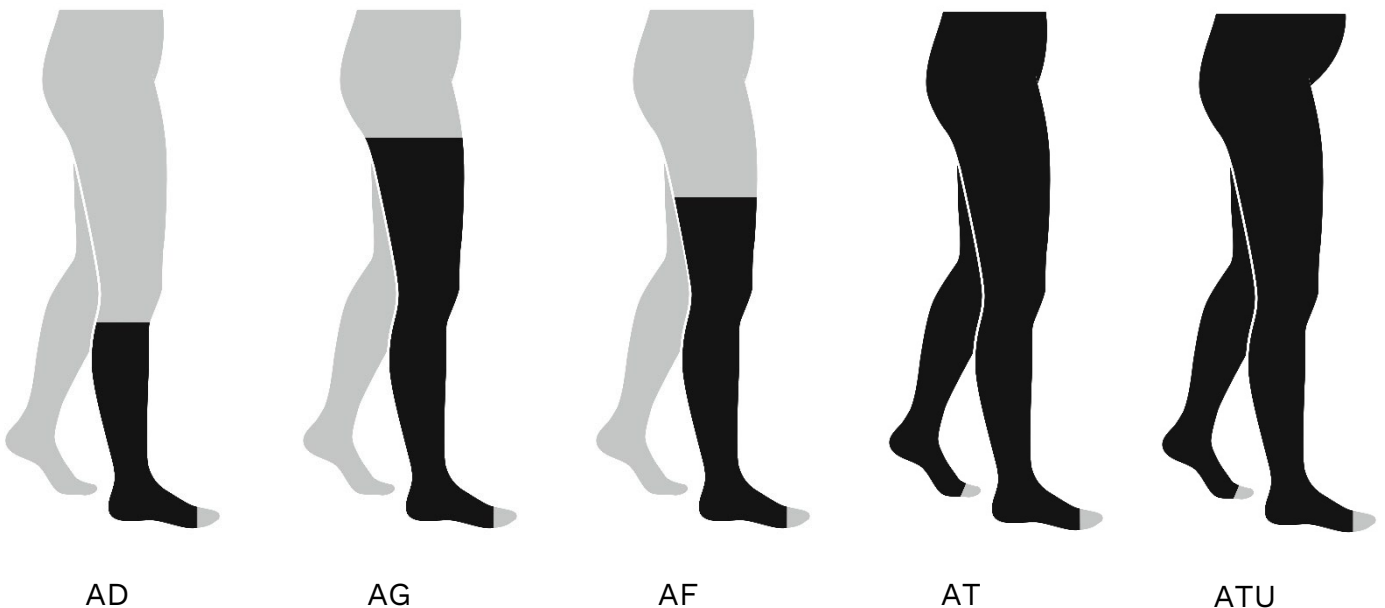

Kompressiotuotteet

Juzo Basic



**Perussukka
lievään
turvotukseen.**

Juzo Basic on pyörökudottu lääkinällinen hoitosukka. Materiaali on kestävä ja miellyttävän pehmeän tuntuinen iholla.

Juzo Basic polvi-, reisisukka ja sukkahousut soveltuvat henkilöille, joilla on lievää turvotusta.

Juzo Basic on saatavilla vakiokokoisena kuudessa eri koossa kahta eri pituutta sekä mittatilaustuotteena. Varvasosa joko umpi- tai avokärkinen. Saatavilla kolmessa eri värissä.

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Levottomat ja väsyneet jalat
- Lievät suonikohjut
- Kevyt turvotus
- Raskauden aikana

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Suonikohjuleikkauksen jälkeen
- Suonikohjuja ja turvotusta
- Posttraumaattinen turvotus
- Syvän laskimotukoksen jälkeen
- Kohtalaisen vakavien haavaumien jälkeen

Materiaali:

Paineluokka 1: 73 % polyamidi, 27 % elastaani

Paineluokka 2: 64 % polyamidi, 36 % elastaani

Kompressiotuotteet

Juzo Soft



Herkkäihoisille.

**Lievään ja
kohtalaiseen
turvotukseen.**

Juzo Soft on pehmeä pyörökudottu, runsaselastinen lääkinällinen hoitosukka. Joustava ja napakka materiaali takaa miellyttävän tuntuman iholla. Sopii herkkäihoisille käyttäjille. Pyörökudottu joustava materiaali sisältää runsaasti elastaania, joka helpottaa pukemista.

Juzo® Soft polvi-, reisisukka ja sukkahousut soveltuvat henkilöille, joilla on mm. laskimo- ja/tai imusuoniston vajaatoiminnasta, suurista traumaista, akuuteista trombeista tai syöpäleikkauksista johtuvia lieviä tai kohtalaisia turvotuksia. Sukan käyttö tehostaa laskimoiden ja imusuoniston toimintaa, vähentää turvotusta ja pitää sitä hallinnassa. Sukan istuvuus on hyvä ja sen käyttö miellyttävää, joten sitä voi käyttää koko päivän ajan. Sukkaa käyttäessään potilas voi liikkua ja istua normaalisti.

Juzo Soft on saatavilla vakiokokoisena kuudessa eri koossa ja kolmessa eri pituudessa sekä mittatilaustuotteena. Varvasosa umpi- tai avokärkinen. Runsaasti värivaihtoehtoja: perusvärit, kausittain vaihtuvat trendivärit sekä batiikkivärejä.

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Levottomat ja väsyneet jalat
- Lievät suonikohjut
- Kevyt turvotus
- Raskauden aikana

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Suonikohjuleikkauksen jälkeen
- Suonikohjuja ja turvotusta
- Posttraumaattinen turvotus
- Syvän laskimotukoksen jälkeen
- Kohtalaisen vakavien haavaumien jälkeen

Materiaali:

Paineluokka 1: 73 % polyamidi, 27 % elastaani

Paineluokka 2: 65 % polyamidi, 35 % elastaani

Kompressiotuotteet

Juzo Dynamic Cotton



**Erittäin
ihoystävällinen
puuvillan
ansioista.**

**Keskivaikeaan
turvotukseen.**

Juzo Dynamic Cotton on pyörökudottu lääkinnällinen hoitosukka, jossa on korkea puuvillapitoisuus. Sisäpinnan puuvillapinta on erittäin ihoystävällinen ja miellyttävän tuntuinen iholla. Sopii herkkäihoisille.

Juzo Dynamic Cotton polvi-, reisisukka ja sukkahousut soveltuvat henkilöille, joilla on keskivaikea turvotus. Napakka pyörökudottu materiaali.

Juzo Dynamic Cotton on saatavilla vakiokokoisena kuudessa eri koossa ja kolmessa eri pituudessa sekä mittatilaustuotteena. Saatavana kahdessa eri värissä.

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Levottomat ja väsyneet jalat
- Lievät suonikohjut
- Kevyt turvotus
- Raskauden aikana

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Suonikohjuleikkauksen jälkeen
- Suonikohjuja ja turvotusta
- Posttraumaattinen turvotus
- Syvän laskimotukoksen jälkeen
- Kohtalaisen vakavien haavaumien jälkeen

Materiaali:

CCL1: 42% polyamide, 40% cotton, 18% elastane

CCL2: 42% polyamide, 35% cotton, 23% elastane

Kompressiotuotteet

Juzo Adventure



**Kulutusta kestävä.
Aktiiviliikkujalle.**

Juzo Adventure on pyörökudottu lääkinnällinen hoitosukka. Räätelöity aktiivisen käyttäjän tarpeisiin. Erityisen vahva ja kulutusta kestävä materiaali, joka sopii erityisesti ulkoiluun ja urheiluun. Korkean puuvillapitoisuuden ansiosta erittäin ihoystävällinen.

Juzo Adventure polvisukat soveltuvat henkilöille, joilla polvipituinen sukka on hoidollisesti riittävä ja sukalta vaaditaan kulutuskestävyyttä.

Juzo Adventure suunniteltu erityisesti miehille. Standardikoossa jalkaterän mitoitus sopii hyvin kookkaaseenkin jalkaan, jopa kengän kokoon 46 venyvä jalkaterä.

Juzo adventure polvimittainen sukka on saatavilla vakiokokoisena kuudessa eri koossa ja kolmessa eri pituudessa sekä mittatilaustuotteena. Saatavilla kahdeksan eri väriä.

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Levottomat ja väsyneet jalat
- Lievät suonikohjut
- Kevyt turvotus

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Suonikohjuleikkauksen jälkeen
- Suonikohjuja ja turvotusta
- Posttraumaattinen turvotus
- Syvän laskimotukoksen jälkeen
- Kohtalaisen vakavien haavaumien jälkeen

Materiaali:

Paineluokka 1: 42% polyamide, 40% cotton, 18% elastane

Paineluokka 2: 42% polyamide, 35% cotton, 23% elastane

Kompressiotuotteet

Juzo Move



**Hiostamaton
mikrokuitumateriaali.
Tilava kantaosa.**

Juzo Move on pyörökudottu lääkinällinen hoitosukka. Pyörökudottu mikrokuitumateriaali on erityisen miellyttävän tuntuinen iholla. Juzo Move AD on erityisesti suunnattu aktiiviseen elämään ja kestää hyvin kulutusta. Innovatiivisen materiaalin ja tilavan, miellyttävän kantaosan ansiosta sukka on helppo pukea päälle.

Ainutlaatuinen nilkkaneulos minimoi sisäänleikkauksen, kun jalka on 90 asteen kulmassa.

Juzo Move on saatavilla vakiokokoisena kuudessa eri koossa kolmessa eri pituudessa sekä mittatilaustuotteena. Varvasosa joko umpi- tai avokärkinen.

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Levottomat ja väsyneet jalat
- Lievät suonikohjut
- Kevyt turvotus
- Raskauden aikana

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Suonikohjuleikkauksen jälkeen
- Suonikohjuja ja turvotusta
- Posttraumaattinen turvotus
- Syvän laskimotukoksen jälkeen
- Kohtalaisen vakavien haavaumien jälkeen

Kompressioluokka 3, CCL3

34-46 mmHg

- Vakava turvotus
- Vakavien, toistuvien haavaumien hoito
- Lymfedeema eli imunesteturvotus
- Elephantiasis

Materiaali:

CCL1: 78% polyamide, 22% elastane

CCL2: 75% polyamide, 25% elastane

CCL3: 70% polyamide, 30% elastane

Kompressiotuotteet

Juzo Intenso



**Erittäin tehokas
pyörökudottu, jopa
vaihtoehto
laakakudotulle
materiaalille.**

Juzo Intenso on erittäin tehokas pyörökudottu lääkinällinen hoitosukka. Juzon malliston vahvin pyörökudottu materiaali. Jopa vaihtoehto laakakudotulle materiaalille. Sukan sisäpinnalle on integroitu pehmeä materiaali, jonka vuoksi sukka on pehmeä ja mukava käyttää. Pyörökudotuista materiaaleista lähinnä laakakudotun ominaisuuksia

Saatavilla vakiokokoisena kuudessa eri koossa kolmessa eri pituudessa sekä maxikoot ja mittatilaustuotteet. Maxikoossa laajempi pohjetilavuus. Kahdeksan eri väri vaihtoehtoa.

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Suonikohjuleikkauksen jälkeen
- Suonikohjuja ja turvotusta
- Posttraumaattinen turvotus
- Syvän laskimotukoksen jälkeen
- Kohtalaisen vakavien haavaumien jälkeen

Kompressioluokka 3, CCL3

34-46 mmHg

- Vakava turvotus
- Vakavien, toistuvien haavaumien hoito
- Lymfedeema eli imunesteturvotus
- Elephantiasis

Materiaali:

CCL2: 80% polyamide, 20% elastane

CCL3: 83% polyamide, 17% elastane

Kompressiotuotteet

Juzo Expert

Juzo Expert-sarjan tuotteet ovat vähäelastisia ja valmistettu miellyttävän pehmeästä laakakudotusta materiaalista. Sauma on litteä ja joustava. Erottuu muista tuotteista pehmeydellään ja hillityn elegantilla pinta-rakenteellaan. Erittäin hengittävä materiaali.

Juzo Expert polvi- ja reisisukka soveltuu henkilöille, joilla on mm. laskimo- ja/tai imusuoniston vajaatoiminnasta, suurista traumaista, akuuteista trombeista tai syöpäleikkauksista johtuvaa turvotusta.

Sukan käyttö tehostaa laskimoiden ja imusuoniston toimintaa, vähentää turvotusta ja pitää sitä hallinnassa. Sukan istuvuus on hyvä ja sen käyttö miellyttävää, joten sitä voi käyttää koko päivän ajan. Sukkaa käyttäessään potilas voi liikkua ja istua normaalisti.

Juzo Expert -sarjan tuotteet ovat tarkoitettu erityisesti yksilöllisiin tarpeisiin. Runsaan lisäominaisuusvalikoiman ansiosta tuotteita voidaan yksilöidä tarpeen mukaan. Tyypillisimmät lisäominaisuudet ovat vetoketjut, lisäsilikonit, anatomiset sekä funktionaaliset nilkka- ja polvineulokset sekä viistotut yläosat ja kärkeosat.

Runsaasti väri vaihtoehtoja: perusvärit, kausittain vaihtuvat trendivärit sekä batiikkivärejä.

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Levottomat ja väsyneet jalat
- Lievät suonikohjut
- Kevyt turvotus
- Raskauden aikana

Kompressioluokka 3, CCL3

34-46 mmHg

- Vakava turvotus
- Vakavien, toistuvien haavaumien hoito
- Lymfedeema eli imunesteturvotus
- Elephantiasis

Materiaali (väri Almond):

Paineluokka 1: 66% polyamidi, 15% elastaani, 19% viskoosi

Paineluokka 2: 62% polyamidi, 22% elastaani, 16% viskoosi



Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Suonikohjuleikkauksen jälkeen
- Suonikohjuja ja turvotusta
- Posttraumaattinen turvotus
- Syvän laskimotukoksen jälkeen
- Kohtalaisen vakavien haavaumien jälkeen

Kompressioluokka 4 CCL4

< 49 mmHg

- hyvin voimakas kompressio
- vakavat lymfaattiset tukokset
- lymfaturvotus ja fibroosi

Paineluokka 3: 42% polyamidi,

36% elastaani, 22% viskoosi

Paineluokka 4: 55% polyamidi,

45% elastaani

Kompressiotuotteet

Lymed Compression



**Erinomainen
ratkaisu
haavahoidettaville.
Käyttäjän helppo
riisua itse.
Avustajan nopea ja
helppo pukea.**

Lymed Compression lääkinnälliset kompressiosukat ovat yksilöllisesti valmistettavia mittatilaustuotteita. Valmistettu lycrakankaasta ompelemalla. Tämä mahdollistaa tuotteen valmistuksen hyvinkin poikkeavien muotojen mukaan, esimerkiksi kudospuutoksissa. Lymed Compression-sukissa on anatominen nilkan muotoilu sekä anatominen polvitaive yli polven ylettävissä malleissa. Anatominen muotoilu parantaa sukan istuvuutta. Litteä saumarakenne.

Hyvä ratkaisu kun perinteisen hoitosukan riisuminen tuottaa vaikeuksia. Avustajan nopea ja helppo pukea. Käyttäjän helppo riisua itse. Kun omatoiminen riisuminen onnistuu, voi avun tarve vähentyä merkittävästi.

Sukkia on saatavilla muun muassa nilkka-, polvi- ja reisivälikokoon.

Mittatilaustuotteisiin saadaan yksilöllisiä ratkaisuja käyttäjän tarpeisiin lisäominaisuuksien ja erikoisratkaisujen avulla. Tyypillisimmät lisäominaisuudet ovat vetoketjut, sisäpehmuste vetoketjun alle ihoa suojaamaan, lisäsilikoninauhat, vetolenkit tai renkaat, taskut, täytteet.

Vetoketjun ansioista pukeminen esim. haavasidosten päälle helppoa ja käyttäjälle miellyttävää.

Värivaihtoehtoja on useita. **Materiaali:** polyamidi-elastaani-sekoite

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Levottomat ja väsyneet jalat
- Lievät suonikohjut
- Kevyt turvotus
- Raskauden aikana

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Suonikohjuleikkauksen jälkeen
- Suonikohjuja ja turvotusta
- Posttraumaattinen turvotus
- Syvän laskimotukoksen jälkeen
- Kohtalaisen vakavien haavaumien jälkeen

Kompressioluokka 3, CCL3

34-46 mmHg

- Vakava turvotus
- Vakavien, toistuvien haavaumien hoito
- Lymfedeema eli imunesteturvotus
- Elephantiasis

Kompressioluokka 4 CCL4

< 49 mmHg

- hyvin voimakas kompressio
- vakavat lymfaattiset tukokset
- lymfaturvotus ja fibroosi

Kompressiotuotteet

Juzo Compression Wrap



**Vaativaan
turvotukseen.
Nopea.
Omatoiminen
pukeminen ja
kireyden säätely.**

Juzo Compression Wrap on tarrakiinnitteinen kompressiotuote, jossa on säädettävä työpaine.

Wrap-tuotteet tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon ja täydennyksen tavanomaisille kompressiositeille.

Tarrojen ansioista wrap on helppokäyttöinen. Erinomainen vaihtoehto perinteisille tukisidoksille tai mikäli perinteisen kompressiotuotteen pukeminen on vaikeaa. Mahdollistaa omatoimisen pukemisen ja kireyden säätelyn, jolloin avuntarve vähenee.

Vaativan turvotuksen hoitoon ja tilanteisiin, jossa turvotuksen määrä vaihtelee runsaasti.

Wrap-kompressiojärjestelmä koostuu osista. Osia voidaan käyttää yksittäin tai yhdistelmänä.

Värit: Beige/musta, kumpi tahansa väri käännettävissä päällepäin.

Osia saatavilla eri kokoja ja pituuksia.

Materiaali: 88% polyamide, 12% elastane / Sisäpinta 100% neoprene

Kompressioluokka 1-4, CCL1-4

Säädettävä kompressio

30-60 mmHg

Kompressiotuotteet

Juzo ACS Light



Soveltuu hyvin
itsehoitoon.

Voidaan käyttää
päivin ja öin.

Juzo ACS Light on tarrakiinnitteinen kompressiotuote, jossa on säädettävä työpaine. Tarrakiinnitteiset tuotteet tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon ja täydennyksen tavanomaisille kompressiositeille.

Tarrojen ansioista tuote on helppokäyttöinen. Erinomainen vaihtoehto perinteisille tukisidoksille tai mikäli perinteisen kompressiotuotteen pukeminen on vaikeaa. Mahdollistaa omatoimisen pukemisen ja kireyden säätelyn, jolloin avuntarve vähenee.

Vaativan turvotuksen hoitoon ja tilanteisiin, jossa turvotuksen määrä vaihtelee.

Juzo ACS Light koostuu osista. Osia voidaan käyttää yksittäin tai yhdistelmänä.



Säädettävä kompressio jopa 40mmHg asti. Tämä kattaa paineluokat 1-3. Värity: Musta ja beige. Osia saatavilla eri kokoja ja pituuksia.

Materiaali: 74% polyamide, 15% elastane, 11% polyurethane

Kompressioluokka 1-3, CCL1-4

Säädettävä kompressio
< 40 mmHg

Juzo ACS Light (B)

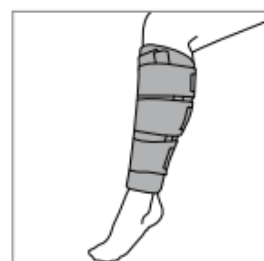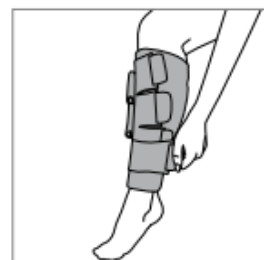

Kompressiotuotteet

Juzo Ulcer Pro



**Kroonistuneiden ja
herkästi uusivien
laskimoperäisten
säärihaajojen hoidossa
hoitopainesuositus
jopa CCL 3.**

Juzo Ulcer Pro on kompressiosukkajärjestelmä, joka helpottaa laskimosäärihaavojen hoitoa. Juzo Ulcer Pro koostuu kahdesta eri tyyppisestä kompressiosukasta, jotka täydentävät toisiaan.

Juzo Ulcer Liner

- Pyörökudottu alussukka
- Käytetään yötäpäivää jatkuvan kompression takaamiseksi
- Haavasidokset pysyvät hyvin paikoillaan alussukan alla
- Suojaa herkkää ihoa
- Kantapään merkintä helpottaa sukan oikein pukemista
- Umpikärkinen varvasosa
- Valkoinen
- 77% polyamide, 23% elastane

Juzo Ulcer Expert

- Laakakudottu päällissukka
- Puetaan päivän ajaksi alussukan päälle hoitopaineen lisäämiseksi
- Avokärkinen varvasosa
- Beige
- 62% polyamide, 22% elastane, 16% viscose

Vakiokokoisena kuusi eri kokoa ja kahta eri pituutta. Saatavana myös mittatilaustuotteena.

Kompressiotuotteet

Lentosukat

Niin kutsutut lentosukat eroavat lääkinnällisistä hoitosukista muun muassa käyttötarkoituksen ja ominaisuuksien osalta.

Lentosukat on suunniteltu turvotuksen ennaltaehkäisyyn ja tukemaan verenkiertoa. Turvotuksen ennaltaehkäisyä suositellaan pitkien lentomatkojen lisäksi pitkille juna- ja automatkoille, sekä seisoma- ja istumatyötä tekeville henkilöille.

Lentosukat on valmistettu kevyemmästä materiaalista kuin lääkinnälliset kompressiosukat. Myös kompressioaste on kevyempi lentosukissa. Lentosukkien kompressioluokka on CCL1 (15-23mmHg) tai pienempi.

Lentosukat mitoitetaan usein kengän tai vaatekoon mukaan. Lentosukan mitoituksessa olisi hyvä huomioida myös nilkan ja pohkeen ympärysmitta sekä säären pituusmitta. Sukka tulee olla oikean mittainen. Liian pitkän sukan reunan rullaaminen tai kääntäminen voi aiheuttaa ongelmia. Lääkinnällisten kompressiosukkien mitoituksessa käytetään useita ympärys- ja pituusmittoja raajasta.

Lentosukkia on saatavilla muun muassa urheiluliikkeistä ja marketeista.

Lentosukka Compressana Twist

Compressana Twist on kevyt ja hengittävä arkisukka, jalkojen hyvinvointiin. Umpikärkinen, polvimittainen. Voidaan käyttää työskennellessä, vapaa-ajalla sekä matkustaessa.

Kompressio 18mmHg

Materiaali: 58% puuvilla, 26% polyamidi, 16% elastaani



**Kevyt ja
hengittävä
arkisukka
jalkojen
hyvinvointiin.**

Kompressiotuotteet

Lääkinnälliset hoitohihat ja -käsineet

Lääkinnälliset hoitohihat on valmistettu joustavasta, kestävästä, hengittävästä ja ihoa vasten miellyttävästä neuloksesta. Lääkinnällisistä hoitohihoista käytetään myös termejä kompressiohiha tai tukihiha.

Hoitohihoa ja -käsineitä ja on saatavilla sekä valmistuotteina että mittatilaustuotteina. Hihoa on saatavana useissa eri pituuksissa ja väreissä. Usein tarve on vain toiseen raajaan, joten hihat toimitetaan kappaleina ei pareina.

Lääkinnälliset hoitohihat saavat puristuspaineen jakautumaan lääketieteellisesti oikealla tavalla. Ranteen alueella hoitopaine on suurin, paine alenee kohti raajan yläosaa. Tämän seurauksena verenkierto ja imunestekierto tehostuu.

Lääkinnällisiä hoitohihoa ja -käsineitä käytetään yläraajan turvotuksen ongelmien hoitoon. Hihoa ja käsineitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen tarpeesta riippuen.

Mittatilauksena valmistettuihin yksilöllisiin hoitohihoihin on mahdollista lisätä useita erilaisia lisäominaisuuksia, jotka parantavat hihan istuvuutta, käytettävyyttä, tehoa ja turvallisuutta. Yläraajan turvotuksen syynä on usein lymfedeema ja turvotus on runsasta. Tämän vuoksi hoitohihoissa käytetään paljon laakakudottua materiaalia.

Lääkinnällisten hoitohihojen ja -käsineiden yleisimmin käytetyt paineluokat ovat CCL 1 ja CCL 2. Kompressioluokka määritellään ranteeseen kohdistuvan paineen perusteella. Kompressioluokan määrittää hoitava lääkäri. Myös hihan pituus ja mahdollinen käsineen tarve on hyvä mainita lääkärin ohjeessa.



Kompressiotuotteet

Hoitohiha Juzo Soft



Herkkäihoisille.

**Lievään ja
kohtalaiseen
turvotukseen.**

Juzo Soft on pehmeä pyörökudottu, runsaselastinen lääkinnällinen hoitohiha. Joustava ja napakka materiaali takaa miellyttävän tuntuman iholla. Sopii herkkäihoisille käyttäjille. Pyörökudottu joustava materiaali sisältää runsaasti elastaania ja tekee pukemisesta helppoa.

Juzo® Soft -hoitohiha soveltuu henkilöille, jolla on esim. kainalon imusolmukkeiden poistamisesta, synnynnäisestä imusuoniston vajaatoiminnasta tai traumasta johtuva johtuva lievä yläraajan turvotus. Hihan käyttö tehostaa imusuoniston toimintaa, vähentää turvotusta ja pitää sitä hallinnassa. Hihan istuvuus on hyvä ja sen käyttö miellyttävää, joten sitä voi käyttää koko päivän ajan. Hihaa käyttäessä potilas pystyy suoriutumaan normaaleista jokapäiväisistä arjen tehtävistä.

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Imunesteperäinen turvotus eli lymfedeema
- Lievä turvotus
- Kun suositeltu hoitopaine olisi CCL 2, mutta sen pukeminen ei onnistu

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Imunesteperäinen turvotus eli lymfedeema
- Posttraumaattinen turvotus

Materiaali:

Paineluokka 1: 73% polyamidi, 27% elastaani

Paineluokka 2: 65% polyamidi, 35% elastaani

Kompressiotuotteet

Hoitohiha Juzo Expert

Juzo Expert-hoitohiha on vähäelastinen ja valmistettu miellyttävän pehmeästä laakakudotusta materiaalista. Sauma on litteä ja joustava. Erottuu muista tuotteista pehmeydellään ja hillityn elegantilla pintarakenteellaan.

Erittäin hengittävä materiaali.

Juzo® Expert-hoitohiha soveltuu henkilöille, jolla on esim. kainalon imusolmukkeiden poistamisesta, synnytyksistä imusuoniston vajaatoiminnasta tai traumasta johtuva runsas yläraajan turvotus. Hihan käyttö tehostaa imusuoniston toimintaa, vähentää turvotusta ja pitää sitä hallinnassa. Hihan istuvuus on hyvä ja sen käyttö miellyttävää, joten sitä voi käyttää koko päivän ajan. Hihaa käyttäessä potilas pystyy suoriutumaan normaaleista jokapäiväisistä arjen tehtävistä.

Juzo Expert-sarjan tuotteet ovat tarkoitettu erityisesti yksilöllisiin tarpeisiin. Runsaan lisäominaisuusvalikoiman ansiosta tuotteita voidaan yksilöidä tarpeen mukaan.

Tyypillisimmät lisäominaisuudet ovat Silikonireunus, olkaosa + vartalokiinnitys, anatominen/funktionaalinen kyynärneulos, trikoovuoraus, korotettu muotoilu, pelottitaskut lisäpainetyynyille ja vetoketjut.

Runsaasti väri vaihtoehtoja: perusvärit, kausittain vaihtuvat trendivärit sekä batiikkivärejä.

**Vaikean
turvotuksen
hoitoon.
Runsaasti lisä-
ominaisuuksia
yksilöllisiin
tarpeisiin.**



Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Imunesteperäinen turvotus eli lymfedeema
- Lievä turvotus
- Kun suositeltu hoitopaine olisi CCL 2, mutta sen pukeminen ei onnistu

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Imunesteperäinen turvotus eli lymfedeema
- Posttraumaattinen turvotus

Kompressioluokka 3, CCL3

34-46 mmHg

- Vakava turvotus
- Lymfedeema eli imunesteturvotus
- Elephantiasis

Materiaali (väri Almond):

Paineluokka 1: 66% polyamidi, 15 % elastaani, 19% viskoosi

Paineluokka 2: 62% polyamidi, 22 % elastaani, 16% viskoosi

Paineluokka 3: 42 % polyamidi, 36 % elastaani, 22% viskoosi

Paineluokka 4: 55% polyamidi, 45 % elastaani

Kompressiotuotteet

Juzo Compression Wrap



**Vaativaan
turvotukseen.
Nopea.
Omatoiminen
pukeminen ja
kireyden
säätely.**

Juzo Compression Wrap on tarrakiinnitteinen kompressiotuote, jossa on säädettävä työpaine.

Wrap-tuotteet tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon ja täydennyksen tavanomaisille kompressiositeille. Tarrojen ansioista wrap on helppokäyttöinen. Erinomainen vaihtoehto, mikäli perinteisen kompressiotuotteen pukeminen on vaikeaa. Mahdollistaa omatoimisen pukemisen ja kireyden säätelyn, jolloin avuntarve vähenee.

Vaativan turvotuksen hoitoon ja tilanteisiin, jossa turvotuksen määrä vaihtelee runsaasti.

Wrap-kompressiojärjestelmä koostuu osista. Osia voidaan käyttää yksittäin tai yhdistelmänä.

Säädettävä kompressio 30–60 mmHg. Tämä kattaa paineluokat 1–4. Väri: Beige/musta, kumpi tahansa väri käännettävissä päällepäin.

Osia saatavilla eri kokoja ja pituuksia.

Materiaali:

88% polyamide, 12% elastane

Sisäpinta 100% neoprene

Kompressiotuotteet

Juzo ACS Light



Soveltuu hyvin
itsehoitoon.

Voidaan käyttää
päivin ja öin.

Juzo ACS Light on tarrakiinnitteinen kompressiotuote, jossa on säädettävä työpaine. Tarrakiinnitteiset tuotteet tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon ja täydennyksen tavanomaisille kompressiositeille.

Tarrojen ansioista tuote on helppokäyttöinen. Erinomainen vaihtoehto perinteisille tukisidoksille tai mikäli perinteisen kompressiotuotteen pukeminen on vaikeaa. Mahdollistaa omatoimisen pukemisen ja kireyden säätelyn, jolloin avuntarve vähenee.

Vaativan turvotuksen hoitoon ja tilanteisiin, jossa turvotuksen määrä vaihtelee.




Juzo ACS Light koostuu osista. Osia voidaan käyttää yksittäin tai yhdistelmänä.

Säädettävä kompressio jopa 40mmHg asti. Tämä kattaa paineluokat 1-3. Väri: musta.

Osia saatavilla eri kokoja ja pituuksia.

Materiaali: 74% polyamide, 15% elastane, 11% polyurethane

Juzo ACS Light (F)

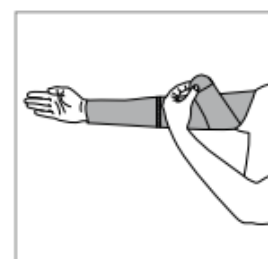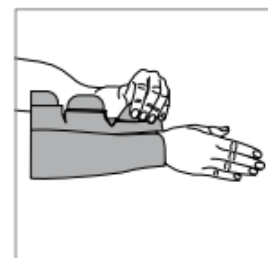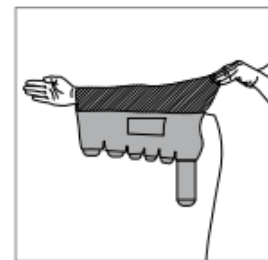

Hoitokäsine Juzo Classic Seamless

Juzo® Classic Seamless on pyörökudottu lääkinällinen hoitokäsine 3/4-sormiosalla.

Tuote soveltuu henkilöille, jolla on yläraajan turvotusta esim. kainalon imusolmukkeiden poistamisesta johtuen. Käsineen käyttö tehostaa imusuoniston toimintaa, vähentää turvotusta ja pitää sitä hallinnassa. Käsineen istuvuus on hyvä ja sen käyttö miellyttävää, joten sitä voi käyttää koko päivän ajan. Käsineettä käyttäessään potilaan pystyy suoriutumaan arjen tehtävistä.

Saumaton, lateksiton, napakka ohut materiaali sopii erinomaisesti työskentelyyn, jossa sormilta vaaditaan vapaata liikkuvuutta, kuten päätetyöskentely.

Saatavana standardikokoisena kuudessa eri koossa (XS-XXL) ja kolmessa eri värissä.



Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Immunesteperäinen turvotus eli lymfedeema
- Lievä turvotus
- Kun suositeltu hoitopaine olisi CCL 2, mutta sen pukeminen ei onnistu

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Immunesteperäinen turvotus eli lymfedeema
- Posttraumaattinen turvotus

Materiaali:

Paineluokka 1: 79% polyamidi, 21% elastaani

Paineluokka 2: 76% polyamidi, 24% elastaani

Hoitokäsine Juzo Expert

Juzo® Expert on laakakudottu lääkinällinen hoitokäsine.

Hoitokäsine soveltuu henkilöille, jolla on yläraajan turvotusta esim. kainalon imusolmukkeiden poistamisesta johtuen. Käsineen käyttö tehostaa imusuoniston toimintaa, vähentää turvotusta ja parantaa turvotuksen hallintaa.

Käsinettä voidaan käyttää koko päivän. Käsineen istuvuus on hyvä. Materiaali on pehmeä ja hengittävä. Käsinettä käyttäessään potilaan pystyy suoriutumaan arjen tehtävistä, käsine ei rajoita peukalon liikkuvuutta.

Saatavana standardikokoisena 6 eri kokoa sekä mittatilauksena 14 eri värissä.



**Vaikean
turvotuksen
hoitoon.**

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

- Imunesteperäinen turvotus eli lymfedeema
- Lievä turvotus
- Kun suositeltu hoitopaine olisi CCL 2, mutta sen pukeminen ei onnistu

Kompressioluokka 2, CCL2

23-32 mmHg

- Imunesteperäinen turvotus eli lymfedeema
- Posttraumaattinen turvotus

Kompressiotuotteet

Kompressiotuote yökäyttöön

Juzo SleepCompress



Juzo SleepCompress on kompressiotuote, joka on suunniteltu käytettäväksi vaikean turvotuksen hoitoon silloin kuin turvotus ei laske yön aikana. Käytetään yöllä ja muina lepoaikoina aikana tukemaan imunestekierron toimintaa sekä vähentämään turvotusta

Ainutlaatuinen rakenne ja lämpöä säätelevä materiaali tekee tuotteesta hengittävän ja miellyttävän käyttää. Helppo pukea ja riisua.

Saatavilla viisi eri kokoa ja kolmea eri pituutta.
Väri: musta

Materiaali:

Pinta: 88% Polyamid, 12% Elasthan

Foam: 100% Polyurethan

Sisäpinta: 83% Polyamid, 17% Elasthan

**Yöaikaisen
turvotuksen
hoitoon.**

Kompressiotuotteet

Post-operatiiviset Kompressiorintaliivit

Amoena Curasupport Compression

Kevyt kompressio



Leyla

Keskivahva kompressio



Sina

Vahva kompressio



Pamela

Amonena CuraSupport Compression kompressioliivit ovat valmistustuotteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi rintaleikkauksen jälkeen. Kompressiorintaliivit edesauttavat leikkauksesta toipumista stabiloimalla rintakudosta, vähentämällä turvotusta kainaloiden, kylkien ja selän alueelta sekä lievittämällä kipuja.

Saumattomat, edestä suljettavat kompressioliivit on helppo pukea. Saumattomat proteesitaskut mahdollistavat ensi- ja silikoniproteesin käytön. Tarvittaessa liivejä voidaan käyttää myös ilman proteesia.

Leveät ja säädettävät olkaimet vähentävät niskaan ja hartiaan kohdistuvaa kuormitusta sekä mahdollistaa liivien säätämisen tarpeen mukaan. Säädettävien olkaimien ansioista liivit on helppo mitoittaa rinnanalusmitan mukaan. Erillisiä kuppikokoja ei tarvita.

Liivien kompressiovyöhykkeet on suunniteltu tukemaan nestekiertoa ja vähentämään turvotusta erityisesti kylkien, kainaloiden ja selän alueelta.

CuraSupport Compression-mallisto sisältää kolme eri kompressiotason liiviä.

- Leyla – kevyt kompressio, vetoketjukiinnitys, ei kompressiota rinnan alueella
- Sina – keskivahva kompressio, säädettävä hakaskiinnitys, tasainen paine myös rinnan alueella
- Pamela – voimakas kompressio, vetoketjukiinnitys, koko rinnan alueelle kohdistuva paine

Liiveihin on mahdollista liittää myös erillinen kompressiovyö.

Materiaali:

Leyla: 49% polyamidi, 43% puuvilla, 8% elastaani

Sina, Pamela: 98% polyamidi, 2% elastaani

Kompressiotuotteet

Kompressiorintaliivit

Lymed Compression -rintaliivit

Lymed Compression-rintaliivit ovat kompressiorintaliivit, joiden tarkoituksena on poistaa turvotusta kylkien ja kainaloiden alueelta. Saatavilla standardituotteena ja yksilöllisesti valmistettuna.

Pääntie voidaan valita, joko korkealla tai avaralla mallilla. Samoin kainaloaukko on valittavissa korkeana tai avarana. Edessä oleva vetoketju- tai hakaskiinnitys helpottaa pukemista.

Valmisliivit CCL 2

Mittatilausrintaliivit CCL 1 – CCL3

Ohut,
miellyttävä
lycra-
materiaali.



Lymfakompressioliivit

Amoena Curalymph Compression

Amoena Curalymph Compression-liivit on suunniteltu erityisesti lymfaturvotuksen hoitoon. Liiveissä on tehokas paine, joka tukee lymfakiertoa. Tuotteiden sisäpinnalla kohokuviointi, jolla on kevyt, hierova lymfakiertoa tukeva vaikutus.

Liivit tehostavat nestekiertoa tuottamalla tasaista painetta etenkin rintakehän ja rinnan alueelle. Liiveissä on leveät säädettävät olkaimet. Liivien etuosan kiinnitys helpottaa pukemista. Saumaton muotoilu ja proteesitaskut molemmiin puoliin.

Curalymph Compression-mallisto sisältää kaksi erilaista liiviä.

- Lymph Flow Soft Bra Front Closure: vetoketjukiinnitys, olkaimien säätö tarroilla
- Lymph Flow Soft Bra Front Closure: hakaskiinnitys, säädettävät olkaimet

Kompressioluokka 1, CCL1

18-21 mmHg

Imunesteperäinen turvotus
eli lymfedeema

Lymfa-
turvotuksen
hoitoon.

Lymph Flow Soft Bra Front Closure



Lymph Flow Long



Materiaali: Lymph Flow Soft Bra Front Closure : 50% polyamidi, 38% silikon, 11% elastaani, 1% polypropyleeni / Lymph Flow Long: 89% polyamidi, 11% elastaani

Kompressiotuotteen pukeminen

Kompressiotuotteita käytetään pääsääntöisesti päivittäin aamusta iltaan, ellei toisin ohjata. Kompressiotuote puetaan mahdollisimman pian sängystä nousemisen jälkeen. Kompressiotuotteen tuotteen pukeminen voi olla haasteellista.

Pukemisessa tulee käyttää oikeaa pukemistekniikkaa, joka käyttäjälle ohjataan. Apuna on hyvä käyttää kumikäsineitä. Käsineiden käyttö mahdollistaa paremman otteen kompressiotuotteesta, mikä helpottaa pukemista. Käsineet myös suojaavat tuotteen herkkää neulosta ja estävät tuotetta rikkoontumasta ja näin pidentävää tuotteen käyttöikää.


Pukemisen helpottamiseksi hihaan tai sukkaan voidaan lisätä vetoketju. Tulee kuitenkin muistaa, että vetoketju on aina riski etenkin herkälle ja ohuelle ihoalueelle. Vetoketjun käyttäminen vaatii myös sormivoimia. Vetoketjun käyttöä tulee harkita asiantuntijan kanssa.

Pukemista ja riisumista helpottavat erilaiset pukemisen apuvälineet. Valtakunnallisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden mukaan sukkiin ja hihojen pukemisen ja riisumisen tarvittavat apuvälineet luovutetaan ensimmäisen tukisukan tai -hihan luovutuksen yhteydessä ja uusitaan tarvittaessa.

Easy Fit on lääkinnällisten kompressiosukkiin pukemiseen ja riisumiseen tarkoitettu sukanvetolaite. Sukanvetolaite on pukeutumis-apu, josta on hyötyä kaikissa tukisukkiin ja sukkahousujen pukemistilanteissa, joissa käyttäjän liikkuvuus tai tarttumiskyky on rajoittunut tai heikentynyt. Tiukan kompressiosukan pukeminen helpottuu, kun sukka venytetään sukanvetolaitteen päälle ja liu'utetaan laitteen avulla paikalleen. Easy Fit sopii sekä avoimella että suljetulla varvasosalla varustetulle sukalle.



**Pukemisen
apuvälineet
helpottavat
kompressio-
tuotteen
pukemista.**

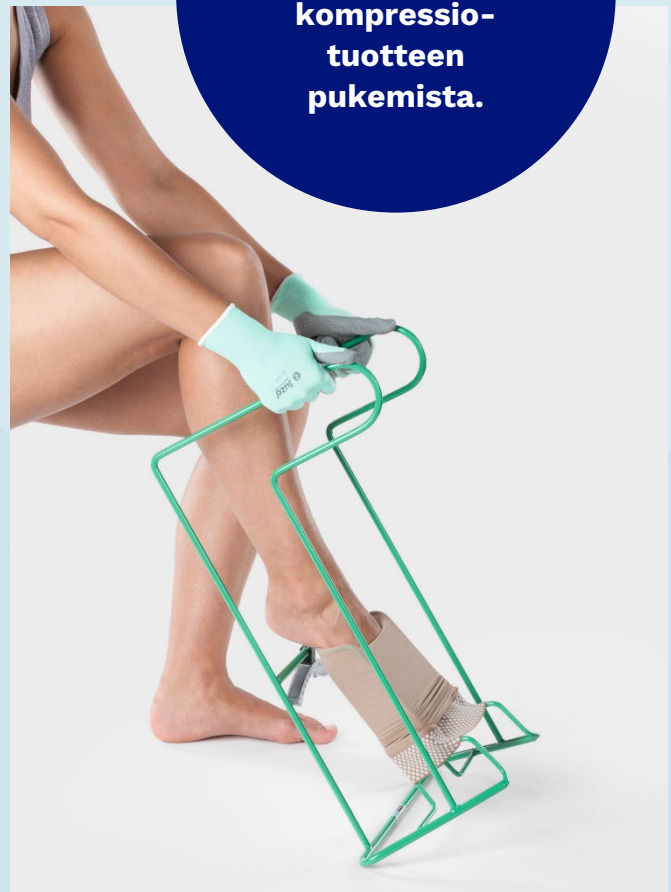


Pukemisen apuvälineet

Liukkaasta purjekankaasta valmistetut pukemisen apuvälineet helpottavat kompressiosukkien pukemista.

SimSlide, EasySlide sekä **EasySlide Magnide** ovat liukkaasta purjekankaasta valmistettuja pukemisen apuvälineitä.

1. SimSlide on apuväline avokärkisten kompressiosukkien pukemiseen ja avotai umpikärkisten kompressiosukkien riisumiseen.
2. EasySlide on apuväline avokärkisten kompressiosukkien ja hoitohihojen pukemiseen.
3. EasySlide Magnide on apuväline umpikärkisten kompressiosukkien pukemiseen tarkoitettu apuväline.

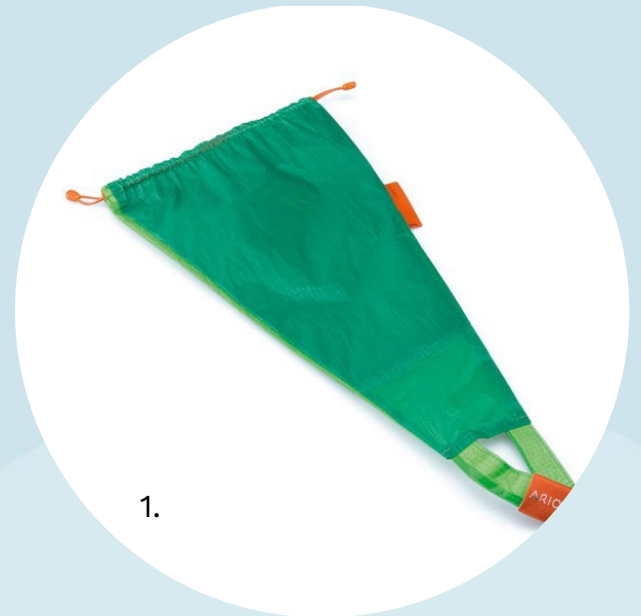

Kompressiotuotteiden yleisimmät käyttöaiheet

Laskimovajaatoiminta

Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta on yleinen, krooninen ja useimmiten etenevä sairaus. Laskimovajaatoiminta on yleisin kompressiohoidon käyttöindikaatio.

Turvotus on laskimovajaatoiminnan yleinen oire. Muita oireita ovat muun muassa painon ja kiristuksen tunne, ihon kutina, särky ja jalkojen väsyminen.

Laskimovajaatoiminnan edetessä turvotus muuttuu jatkuvaksi ja kudosaineenvaihdunta heikkenee ja seurauksena voi kehittyä säärihaava.

Laskimovajaatoiminnan vaikeusaste ja haitta määritellään laskimovajaatoiminnan kliinisen luokittelun ja oireisuuteen perustuvan haittaluokituksen avulla. Lääkäri määrittää laskimovajaatoiminnan kliinisen luokan eli C-luokan.

Tärkeänä osana laskimovajaatoiminnan hoitoa on turvotuksen poistaminen kompressiohoidon avulla.

Komplisoitumattomassa (C2 - 3) laskimovajaatoiminnassa kompressiohoito vähentää oireita ja hyödyttää osaa potilaista.

Komplisoidussa (C4 - 6) laskimovajaatoiminnassa kompressiohoito on merkittävä osa hoitoa.

Yleisimmin laskimovajaatoiminnan hoidossa käytetään kompressioluokan II (KL 2) hoitosukkia. Myös kompressioluokan I (KL 1) hoitosukkien käyttö on mahdollista mikäli asiakkaan kompressionsietokyky tai hoitomyönteisyys kompressioluokan II sukilla on heikko tai asiakas ei pysty pukemaan kompressioluokan II sukia.

Kompressiohoito vaatii potilaalta hyvää sitoutumista hoidon toteutukseen.

**Pahimmillaan
voi johtaa
vaikeasti
hoidettaviin
säärihaavoihin.**

**Alaraajaturvotus
heikentää
elämänlaatua ja
aiheuttaa kipua.**

Kompressiotuotteiden yleisimmät käyttöaiheet

Laskimovajaatoiminta

Laskimovajaatoiminnan vaikeusastetta määriteltäessä käytetään laskimovajaatoiminnan kliinistä luokittelua.

Komplisoitumaton laskimovajaatoiminta (C0–3)	
Kliininen luokka C0	Normaali löydös, ei laskimovajaatoiminnan löydöksiä
Kliininen luokka C1	Teleangiektasioita tai retikulaarisia ihonalaisia laskimoita
Kliininen luokka C2	Suonikohjuja, ei turvotusta, ei laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia
Kliininen luokka C3	Suonikohjuja, turvotusta, ei laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia
Komplisoitunut laskimovajaatoiminta (C4–6)	
Kliininen luokka C4	Laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia: hyperpigmentaatio, ekseema, lipodermatoskleroosi
Kliininen luokka C5	Laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia ja parantunut laskimohaava
Kliininen luokka C6	Laskimovajaatoimintaan liittyviä ihomuutoksia ja avoin laskimohaava

Laskimovajaatoiminnan oireisuuteen perustuva haittaluokitus

Haittaluokka	Oireisuus
0	Ei laskimovajaatoiminnan oireita
1	Laskimovajaatoiminnan oireita, ei tarvetta säännölliseen kompressiohoitoon
2	Laskimovajaatoiminnan oireita, ei kykene työskentelemään ilman kompressiohoitoa
3	Laskimovajaatoiminnan oireita, ei kykene työskentelemään, vaikka kompressiohoito on käytössä

Kompressiotuotteiden yleisimmät käyttöaiheet

Materiaalin valinta erityyppisiin turvotuksiin

Laskimovajaatoiminnan hoidossa ensisijaisesti käytetty materiaali on pyörökudottu materiaali, kuten esim. Juzo Soft tai Juzo Basic. Kuitenkin jos kudot on hyvin pehmeää / poimuuntuva ja turvotus runsasta, voi parempi vaihtoehto olla laakakudottu materiaali.

Imunesteperäisessä eli lymfaturvotuksessa vastaavasti ensisijaiseksi materiaaliksi suositellaan laakakudottu materiaalia, kuten Juzo Expert. Hyvin lievässä lymfaturvotuksessa hoito voidaan aloittaa myös pyörökudotulla materiaalilla, kontrolloiden aktiivisesti, ettei turvotus pääse lisääntymään.

Suositteltu tuote	Juzo Soft/Basic	Lymed Compression	Juzo Expert	Lymed Compression tupla-kankaalla	Juzo Wrap
Oire					
Lievä turvotus	•	•			
Kihelmöinti	•	•			
Väsymisen tunne	•	•			
Puutumisen tunne	•	•			
Iho poimuuntuu		•	•	•	•
Iltaa kohden lisääntyvä voimakas turvotus		•	•	•	•
Pittingödeema		•	•	•	•
Runsas turvotus			•	•	•
Mahdollista fibroisoitumista			•	•	•
Rasvakudoksen liikakasvua			•	•	•

Kompressiotuotteiden yleisimmät käyttöaiheet

Suonikohjut

Pintalaskimoiden vajaatoiminnan tavallisin merkki on **suonikohjut**. Mikäli suonikohjuihin liittyy turvotusta ja kipua, voidaan **oireiden vähentämiseksi käyttää lääkinnällistä hoitosukkaa**.

Suonikohjuihin voi liittyä myös ihomuutoksia. Tällöin hoitona on kompressiohoito, mikäli vasta-aiheita ei ole.

Tarvittaessa suonikohjuja hoidetaan erilaisilla kirurgisilla toimenpiteillä, joista yleisimpiä nykypäivänä ovat laserleikkaus ja vaahtoruiskutus.

Suonikohjuoperaation jälkihoitoon kuuluu aina kompressiohoito pääsääntöisesti reisimittaisin tukisukin, **joissa puristusluokka 2**, ellei hoitava lääkäri muuta ohjeista.

Ohjeen sukan hankkimisesta antaa hoitava taho ennen operatiota, ja sukka/sukat tulee olla mukana operaatioon mentäessä. Hankkiminen on yleensä potilaan omalla vastuulla. Sukka puetaan jalkaan heti toimenpiteen jälkeen toimenpiduhuoneessa.

Hoitava taho antaa ohjeen myös leikkauksen jälkeiseen sukan käyttöön, mutta usein tukisukkaa ohjataan käyttämään ensin ympäri vuorokauden 2-3 vuorokauden ajan, sen jälkeen viikon ajan päivisin (jopa 2-3 viikkoa).

Krooninen alaraajahaava


Kroonisen alaraajahaavan, säärihaavan, syntymiseen voi johtaa monta eri syytä: laskimoiden vajaatoiminta, valtimoiden kalkkeutuminen, diabetes, sydämen vajaatoiminta, ylipaino ja tupakointi.

Suurin osa säärihaavoista on laskimovajaatoiminnan aiheuttamia.

Laskimoperäisen **säärihaavan paranemisen edellytyksenä on turvotuksen häviäminen** sekä laskimopaineen ja kudosaineenvaihdunnan normalisoituminen. Turvotuksen hoito toteutetaan kompressiohoidolla mikäli hoidolle ei ole vasta-aiheita. Kompressiohoitona käytetään joko sidoksia, lääkinnällisiä hoitosukkia tai säädettäviä kompressiotekstiileitä (wrap-sidokset).

Suosittelava hoitosukan kompressioluokka on II (KL 2). Kroonistuneissa/uusiutuneissa säärihaavoissa hoitopainesuositus voi olla jopa KL 3. Kompressioluokan I (KL 1) hoitosukkien käyttö on myös mahdollista mikäli hoitomyönteisyys kompressioluokan II sukilla on heikko. Esimerkiksi iäkkäämmillä henkilöillä kompressioluokka I voi taata paremman hoitoon sitoutumisen.

Mikäli turvotuksen syytä ei saada poistettua, on kompressiohoidon ja hoitosukan tarve pysyvä. Kompressiohoidon jatkaminen pienentää myös haavan uusiutumisen riskiä. Kompressiohoitoa tulisi jatkaa haavan paranemisen jälkeenkin.

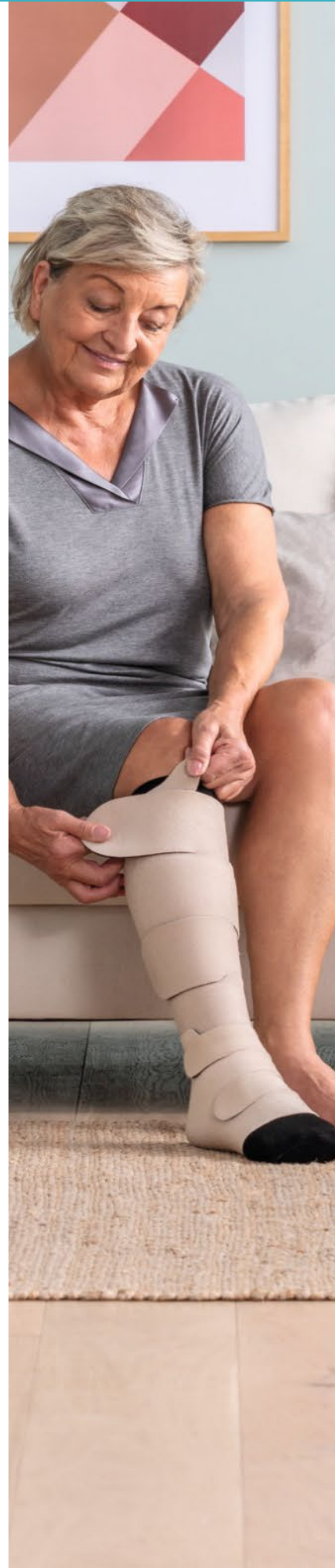

Kompressiotuotteiden yleisimmät käyttöaiheet

Post-operatiivinen kompressiohoito

Turvotuksen hoito

Turvotus on normaali reaktio leikkauksen jälkeen ja kuuluu osana paranemisprosessiin. Pitkäkestoinen ja jatkuva turvotus voi kuitenkin hidastaa kuntoutumista, haavan paranemista ja potilaan toimintakyvyn edistymistä. Turvotus rajoittaa muun muassa nivelten liikelaajuutta. Tällöin esimerkiksi harjoitteiden teko vaikeutuu ja kuntoutuminen hidastuu.

Turvotuksen hoitoon käytetään **lääkinnällisiä kompressiotuotteita**. Niiden avulla pyritään vähentämään leikkauksen jälkeistä turvotusta. Hoidolla on usein myös kipua lievittävä vaikutus.

Hyvä leikkauksen jälkeinen turvotuksen hallinta edesauttaa myös varhaista mobilisaatiota. Kompressio tukee kehontuntemusta, jolloin raajan hallinnan tunne paranee.

Antiembolia

Antiembolia- eli antitromboosisukkia käytetään leikkauksen aikana ja leikkauksen jälkeen vuodelevon aikana ehkäisemään veritulppien muodostumista. Äkillinen vuodelepo lisää veritulppariskiä.

Antiemboliasukan tarjoama asteittaisen puristuksen, joka pienenee jalan alaosaan yläosaan. Antiemboliasukkien kompressio on matalampi kuin lääkitäisissä kompressiosukissa. Tämän vuoksi ne eivät sovellu turvotuksen hoitoon. Antiemboliasukat on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön.

Kompressiotuotteiden yleisimmät käyttöaiheet

Lymfedeema

Lymfedeema eli lymfaturvotus on imuteiden puutteellisesta toiminnasta johtuva krooninen, etenevä sairaus. Kudoksiin kertyy aluksi ylimääräistä nestettä ja vähitellen sidekudoksen ja rasvan määrä lisääntyy ja turvotus jää pysyväksi.

Lymfedeeman oireena on raajan krooninen turvotus, fibroosi (sidekudoksen kovettuma), ylimääräisen rasvakudoksen kertyminen ja ihon paksuuntuminen.

Lymfedeema on yleinen ongelma, joka voi kehittyä leikkauksen, sädehoidon, vammojen, infektioiden tai ylipainon seurauksena.

Lymfedeema on yksi yleisimmistä ongelmista rintasyöpäleikkauksen ja sädehoidon jälkeen.

Lymfedeema voi olla myös synnynnäistä (primääri) eli johtua imuteiden kehityshäiriöstä ja se voi puhjeta murrosiässä tai vasta aikuisena. Primääri lymfedeema esiintyy yleisimmin alaraajoissa.

Lymfedeeman hoito keskittyy turvotuksen vähentämiseen, oireiden lievittämiseen ja lymfakierron tukemiseen.

Keinoina ovat kompressiohoito, fysioterapia, liikunta, lymfaterapia ja ihonhoito, joskus myös kirurgiset toimenpiteet.

Kompressiohoito toteutetaan kompressiosukkien, housujen ja -hihojen, sekä kainalon ja selän alueelle kompressiota tuottavien rintaliivien avulla.

Kompressiohoito tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta turvotus ei etenisi vaikea-asteiseksi. Edetessään lymfaturvotus aiheuttaa pysyviä ihomuutoksia.

Kompressiomateriaaleista hihoissa ja sukissa käytetään ensisijaisesti laakakudottua materiaalia. Laakaneulottu materiaali mahdollistaa hyvän työpaineen ja yksilölliset ratkaisut.



**Kompressiohoito
on olennainen
osa
lymfedeeman
hoitoa**

Kompressiotuotteiden yleisimmät käyttöaiheet

Lipedeema

Lipedeema on heikosti tunnettu, lähes yksinomaan naisilla esiintyvä rasva-aineenvaihdunnan sairaus, jossa kehon alaosiin kertyy suhteettomasti rasvaa. Lipedeema voi esiintyä myös yläraajoissa, mutta pääsääntöisesti alaraajoissa. Rasvaa kertyy symmetrisesti lantion, pakaroiden, reisien ja säärien alueella. Nilkat ja jalkaterät pysyvät hoikkina. Alavartalo useaa kokoa suurempi kuin ylävartalo, eikä rasva häviä laihduttamalla. Rasvan kertyminen rajoittaa nivelten liikkuvuutta. Lipedeemaan liittyy myös mustelmaherkkyys. Lipedeema jaotellaan neljään eri vaiheeseen oireiden esiintyvyyden mukaan.

Lipedeema on kivulias, väärin ymmärretty tila, joka heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Usein lipedemaa sairastava tuntee olevansa yksin sairauden kanssa, koska sairaus on heikosti tunnettu ja herkästi diagnosoituaan virheellisesti molemmin puoleiseksi lymfedeemaksi tai ylipainoksi. Tämä voi aiheuttaa masennusta ja sosiaalisten tilanteiden välttelyä. Usein lipedeemaan liittyykiin myös turvotusta, mutta kuitenkin vain harva kärsii lipo-lymfedeemasta.

Lipedeeman syntymekanismista ei ole varmuutta. Sen oletetaan liittyvän hormonaalisiin muutoksiin kuten murrosikä, raskaus tai vaihdevuodet. Lisäksi geneettisellä taipumuksella näyttää olevan merkitystä lipedeeman syntymiseen.

Parantavaa hoitoa ei ole. Kompressiotekstiilien aktiivisella käytöllä voidaan vaikuttaa oireisiin. Toimintakykyä ja elämänlaatua kohentava hoito tulee aloittaa mahdollisimman varhain. Konservatiivinen hoito koostuu ruokavalio-ohjeistuksesta, kokonaisvaltaisesta fysioterapiasta, manuaalisesta lymfaterapiasta ja kompressiohoidosta.

Kompressiotekstiilien käyttö tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Ccl I laakakudotuilla kompressiotekstiileillä. Myöhemmissä vaiheissa käytetään korkeampaa kompressioluokkaa, mikäli asiakkaan kompression sietokyky tämän sallii. Tyypillisimmin hoidossa käytetään kompressiosukkahousuja tai yhdistettynä kompressiohousuja ja -sukkia.

Kirurgisista toimenpiteistä rasvaimulla voidaan saada pysyviä tuloksia, mutta vaatii tuekseen oikeanlaisen kompressiohoidon.



Kompressiotuotteiden yleisimmät käyttöaiheet

Amputaatiotyngän kompressiohoito

Raaja-amputoidun tyngän turvotuksen hoito on tärkeä osa amputaatiopotilaan hoitoa ja kuntoutusta. Tyngän kompressiohoidon tavoitteena on edistää tyngän verenkiertoa ja vähentää turvotusta.

Ennen ensimmäistä proteesia tynkää tulee valmistella proteesin käyttöönottoa varten. Tyngän turvotus tulee olla hallinnassa ja tilavuuden vaihtelu vakioitunut. Jos tyngän ympärysmitta vaihtelee, protetisointi vaikeutuu ja viivästyy.

Proteesin käyttöönoton myötä pystyasento ja tyngän kuormitus lisää tyngän aineenvaihduntaa ja nestekierto vilkastuu, ja yleensä tynkä supistuu. Mikäli kompressiohoitoa ei ole toteutettu onnistuneesti ja tyngässä on turvotusta, on riskinä tyngän ympärysmittan vaihtelu, jonka seurauksena proteesin istuvuus heikkenee ja käyttö vaikeutuu.

Mikäli estettä kompressiohoidolle ei ole, kompressiohoito voidaan aloittaa heti amputaation jälkeen. Kompressiohoito toteutetaan kompressiotynkäsukalla, kompressiosidoksella tai postoperatiivisella silikonilinerilla.

Kompressiohoito aloitetaan kompressiotynkäsukan käytöllä tai kompressiosidoksilla. Post-op linerin käyttö voidaan aloittaa aikaisintaan 5.-7. postoperatiivisen päivänä. Post-op linerilla on voimakkain tynkää muovaava vaikutus.

	Post-op liner	Kompressio- tynkäsukka	Elastinen sidontanauha
Tuote			
Helppokäyttöinen	+++	++	+
Pukemiseen vaadittava aika	+++	++	+
Ekologisuus (toistuva käyttö)	+++	++	++
Hygieenisuus	+++	++	++
Kompression säätäminen	+	++	+++
Tynkää muovaava vaikutus	+++	++	++

Amputaatiotyngän kompressiohoidosta löydät lisätietoa Respectan verkko-oppaasta *Alaraaja-amputaation jälkeinen kompressiohoito*.

Yhteystiedot

Ajanvaraukset ja asiakaspalvelu:

p. 0207 649 749 asiakaspalvelu@respecta.fi

Tilaukset:

p. 0207 649 748 myynti@respecta.fi

Verkkokauppa verkkokauppa.respecta.fi

respecta.fi

